

Empfehlungen des AK „Qualität“ (28): Tägliche Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) vor Arbeitsbeginn

Durch fachliche Qualifikation ist es gelungen, das Augenmerk weg von der bloßen Sterilisation hin zu einem ganzheitlichen Ansatz der Aufbereitung zu lenken. So wie die tägliche Überprüfung der Sterilisatoren vor Arbeitsbeginn muss auch die Kontrolle der RDGs allen Mitarbeitern einer ZSVA eine selbstverständliche Gewohnheit werden.

Der erste und wichtigste Schritt der Aufbereitung ist eine sachgerechte, erfolgreiche Reinigung und Desinfektion, ohne die eine sichere Sterilisation nicht gewährleistet ist.

Um diese Forderung erfüllen zu können, ist die einwandfreie Funktion durch tägliche → **ROUTINEKONTROLLE** der RDGs wie bei den Sterilisatoren erforderlich.

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen Überprüfungen dokumentiert werden, hierzu sind → **CHECKLISTEN** in Verbindung mit Arbeitsanweisungen geeignet. Als Beispiel zur praktischen Umsetzung stellen wir im Folgenden eine Arbeitsanweisung mit dazugehöriger Checkliste zur Verfügung. Diese kann den Bedürfnissen der jeweiligen ZSVA angepasst werden.

Bei der Umsetzung der Arbeitsanweisung müssen in jedem Fall die → **HERSTELLER-ANGABEN** berücksichtigt werden.

→ **ROUTINEKONTROLLE** der RDG täglich vor Arbeitsbeginn durchführen

→ **CHECKLISTE** und Arbeitsanweisungen erstellen

→ **HERSTELLERANGABEN** berücksichtigen

Arbeitsanweisung zu den einzelnen Punkten der Checkliste

Chemie/Dosierung: Überprüfung der Füllstände in den Vorratsbehältern durch visuelle Kontrolle (eingebaute Behälter, Einzelkanister, Dosieranlage erfordern unterschiedliches Vorgehen)
Lagerbestände prüfen

Flusensiebe: Kontrolle und Reinigung aller Flusensiebe und Überprüfung des Funktionszustandes

Pumpensumpf: Kontrolle und Reinigung, gegebenenfalls Entfernung von Kleinteilen, z.B. Skalpellklingen, Nadeln (Rostgefahr!)

Dreharme: Kontrolle im RDG und an den Beschickungswagen frei drehbar, Lagerung (Schleifspuren erkennbar?), Düsen auf Verstopfung überprüfen und gegebenenfalls reinigen

Beschickungswagen: Kontrolle der Andockungssysteme im RDG und an den Beschickungswagen befindliche Luer-Lock- und Schlauchanschlüsse, Verschlussysteme, etc.

Sichtkontrolle RDG: Überprüfung des Innenraums auf Sauberkeit und Ablagerungen (z.B. Silikate, Rost), Zustandskontrolle der Türdichtung, Sauberkeit und Leckagen

Sonstiges: andere Auffälligkeiten sind auf der Rückseite der Checkliste zu dokumentieren

→ **Bei Auffälligkeiten sind umgehend entsprechende Maßnahmen einzuleiten und zu dokumentieren**

